



## no | Brugsanvisning

### fi | Käytöohje

#### Tuotekuvaus:

Vliwazell® Pro er myk, absorberende kompress som består af et uvevet sárkontaktagt, et uvevet distribusjonslagt, en absorberende kjerne og et beskyttende lag av tekstil.

Det uvevet distribusjonslaget bidrar til en jevn distribusjon av sárskudat, slik at det raskt overfører til det absorberende laget. Det absorberende laget består av et sterilt føllet med en polymerlag, som gjør at Vliwazell® Pro har en svart hoy absorpsjonskapasitet. Et bånd overstyrket eksudat et skader overstyrket eksudat.

For masingasjon av sár og sárrområdet. Den svart hoy absorpsjonskapasitet gjør det mulig med lange intervaller mellom skift av kompress og lange perioder med sárhåv.

I tillegg har Vliwazell® Pro et blått, uvevet materiale på den siden som vender bort fra sár, og som beskytter pasientens klær og segenet.

Vliwazell® Pro er pakket sterilt og enkeltvis, sterilisert med etenoksid.

#### Produktetsammensettning:

Vliwazell® Pro består av følgende komponenter: polydimetylenesiloxan, cellulose, polyetylen, polyvinyltereftalat, etenoksylinyletacetal, polyklorat, polypropilen, smeltemitt.

#### Tiltenkt bruk:

Vliwazell® Pro er egnet til håndtering av eksudat fra akutte og kroniske sár.

#### Indikasjoner:

Vliwazell® Pro er egnet til behandling av overfladiske akutte og kroniske sár.

#### Årsak:

med moderat til svært store mengder med eksudat,

#### symptomer:

og som er overfladiske, ved

#### • arterielle og venose sár

• diabetiske sár

#### • trykksár

• post-traumatisk sár

#### • post-operativt sár som gror etter sekundær intensjon

• etter donasjon av hudtransplantat

#### • onkologiske sár

• sárdarende svulster

#### • sár med infeksjonsrisiko

• overfladiske, annengrads brannsár

#### • lymfesár

#### og som sekundær kompress på laparotomiás - og -fistler.

Vliwazell® Pro kan brukes som sekundær bandasjering ved behandling av sár i tillegg til sár som del av kombinerte sártyper. Suprasorb® A Liquacal hydroaktiv fiber-bandsje, Suprasorb® A+K Alkalimagnital-bandsje, Suprasorb® A+Ag antimikrobiell alkalimagnital-bandsje).

#### Kontraindikasjoner:

Kjent allergi og/eller overfølsomhet overfor noen av produktets bestanddele, ikke for bruk ved tunnelinnlæddende sárformér etter som produktet i stor grad utvides ved absorpsjon av sárskudat. Skal ikke brukes på torre sár.

#### Bivirkninger:

Hudirritasjon og/eller allergi kan i svært sjeldne tilfeller forekomme.

#### Advarsel og forskriftshetsregler:

Ikke klipp eller myne Vliwazell® Pro. Produktet er kun til engangsbruk på én patient og må ikke restilleres. Produktet er sterilt så fremt pakningen er uåpnet og uskadt. Ikke bruk Vliwazell® Pro hvis pakningen er skadet eller døpt.

#### Brugsanvisning:

Appliseres av medisinsk fagpersonell.

#### 1. Klaring:

Før vurdering av sár og påføring av ny kompress, skal alle kompressester fernes fra sárbrunnen når sárret rennes (f.eks. med sterilt saltvann, Ringeroppløsning). Omkringliggende skud skal være ren og tør.

#### 2. Párling:

Kompresstens steriles avhenger av sárets storrelse.

#### Kompresstens steriles skal overlappe sáret med ca. 1-2 cm. Párlor Vliwazell® Pro med den hvide siden med på sár som skal behandles.

I tilfelle dype sár kan Vliwazell® Pro brukes med en sártyper.

#### 3. Párling:

Profilen skal holdes på plass med et egnet materiale (Curafix® H rettensjonsbandsje, Mollelast® elastisk estestekstil) over sárskudat.

#### 4. Bytte kompress:

Hver offte Vliwazell® Pro må byttes ut bestemmes av behandlerne legge basert på sárets tilstand og mengden med eksudat.

#### 5. Kassing:

I Europa kan kassering av produktet tilgøres en avfallskode fra kapittel 18 01 og emballasjen en avfallskode fra kapittel 15 01 i direktivet om den europeiske avfallskatalogen (avfallskatalogen -kommens- - AV). Emballasje som er merket som gjenvinning skal leveres til egnet gjenvinningsstasjon.

#### Generelle instruksjoner:

Ved alvorlige hendelsler, kontakt produsenten og helsemyndigheter.

#### 6. Anslite egenskapene er basert på tilgjengelige in vitro-data:

Medisinprodukt

#### 7. Se brugsanvisningen dersom den sterile forpakningen er skadet eller åpnet ved en feltafelke.

Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 8. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 9. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 10. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 11. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 12. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 13. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 14. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 15. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 16. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 17. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 18. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 19. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 20. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 21. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 22. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 23. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 24. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 25. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 26. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 27. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 28. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 29. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 30. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 31. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 32. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 33. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 34. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 35. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 36. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 37. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 38. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 39. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 40. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 41. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 42. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 43. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 44. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 45. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 46. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 47. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 48. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 49. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 50. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 51. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 52. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 53. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 54. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 55. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 56. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 57. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 58. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 59. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 60. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 61. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 62. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 63. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 64. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 65. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 66. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 67. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 68. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 69. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 70. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 71. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 72. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 73. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 74. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 75. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 76. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 77. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 78. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 79. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 80. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 81. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 82. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 83. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 84. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 85. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 86. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 87. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 88. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 89. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 90. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 91. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 92. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 93. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 94. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 95. Enkeltvis sterilt barrieresystem

#### 96. Enkeltvis sterilt barrieresystem