



People.Health.Care.

Suprasorb® CNP P3

Informationen für Patienten
zur komfortablen Verwendung.



Liebe Patientin, lieber Patient,

bei der Behandlung Ihrer Wunde hat sich Ihr Arzt für das Suprasorb CNP P3 System von Lohmann & Rauscher entschieden. Damit Sie mit dieser Therapie im Alltag gut zurechtkommen, haben wir Ihnen auf den folgenden Seiten alle wichtigen Informationen rund um das CNP P3 System zusammengestellt. Mit unseren Anwendungshinweisen können auch Sie etwas für eine gute Wundheilung tun. Denken Sie jedoch daran, dass die Anlage des Wundverbandes und die Einstellung des Therapiedrucks nur durch medizinisches Fachpersonal vorgenommen werden dürfen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Genesung!



1. Was gehört zu meiner Therapie?.....	4
2. Wie funktioniert meine Therapie?.....	5
3. Wie verwende ich die Suprasorb® CNP P3?.....	6
4. Wie kann ich die Therapie in meinen Alltag integrieren?.....	12
5. Welche Fehlermeldungen kann ich eigenständig beheben?.....	14
6. Wann wende ich mich an meinen Arzt/Pflegedienst oder meinen CNP-Spezialisten?.....	14
7. Hilfreiche Telefonnummern	15




1. Was gehört zu meiner Therapie?

Die Suprasorb CNP P3 wird in einem Koffer geliefert.



Im Koffer befinden sich:

- A** 1x Therapieeinheit Suprasorb CNP P3
- B** 1x Behälter 250 ml
- C** 1x Behälter 1.000 ml*
- D** 1x Netzteil
- E** 1x Betthalter
- F** 1x Gebrauchsanweisung
- G** 1x Tasche

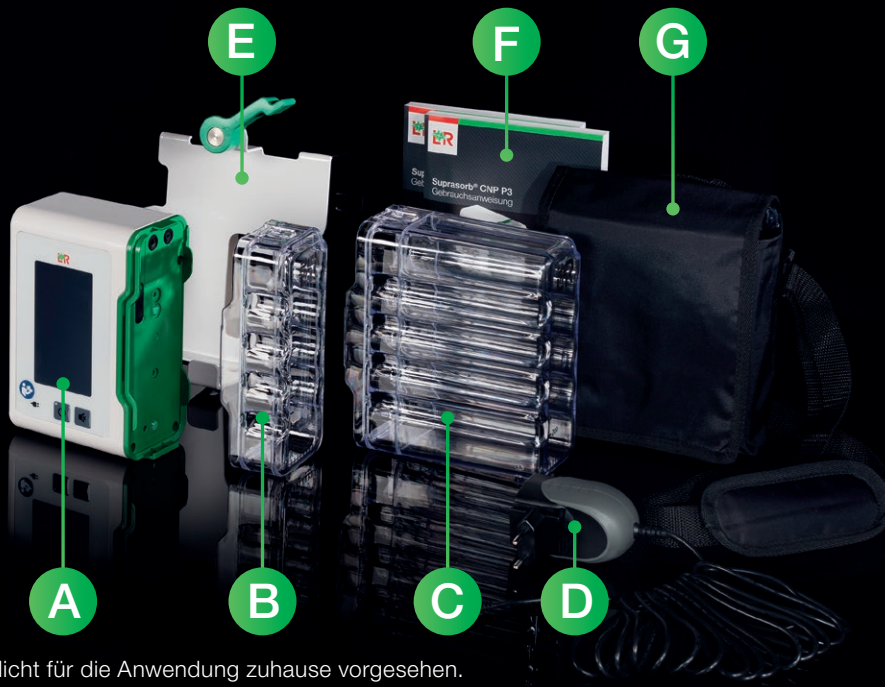

* Nicht für die Anwendung zuhause vorgesehen.

2. Wie funktioniert meine Therapie?




Um Ihre Wunde optimal zu versorgen, hat Ihr Arzt sich für die Therapie mit dem **Suprasorb CNP P3** System entschieden. Diese moderne Behandlungsform wird auch Unterdrucktherapie genannt.

Die **Suprasorb CNP P3** Therapieeinheit erzeugt Unterdruck und leitet so Wundsekret (Exsudat) aus Ihrer Wunde ab. Gleichzeitig wird der Aufbau von neuem, gesundem Gewebe gefördert.


WICHTIG: Ihr Arzt hat das System bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse eingestellt. Bitte verändern Sie daher nichts an den Therapieeinstellungen der Suprasorb CNP P3. Nur so kann die Behandlung erfolgreich verlaufen.

Wie ist ein Unterdruckverband aufgebaut?

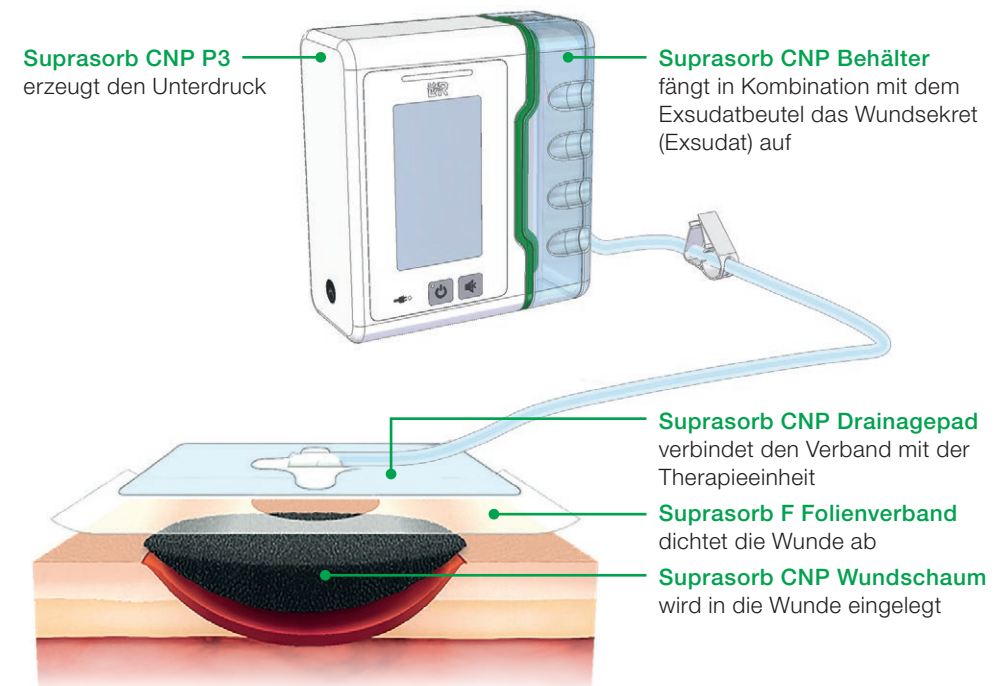

Unterdruckverband mit Wundschaum

3. Wie verwende ich die Suprasorb® CNP P3?

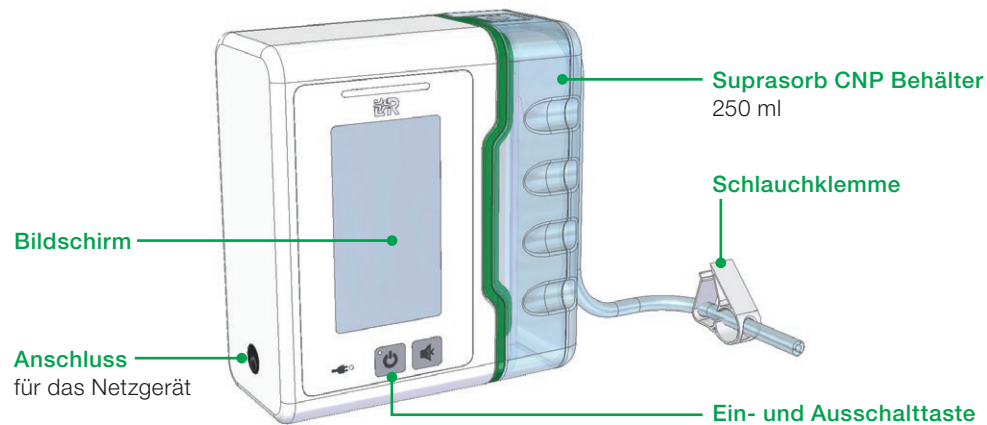

Akku laden

An dieser Stelle können Sie die Therapieeinheit mit der Stromversorgung verbinden.


Tipp: Idealerweise laden Sie den Akku in der Nacht auf, um mit dem Gerät tagsüber mobil zu sein. Der Akku hält vollgeladen mindestens 10 Stunden.

Ein- und ausschalten


Hier können Sie die Therapieeinheit ein- bzw. ausschalten, dazu länger gedrückt halten.

Ist das Gerät eingeschaltet, leuchtet die Lampe der Ein-/Aus-Taste grün.


Die drei Schritte der Schlauch-Konnektion

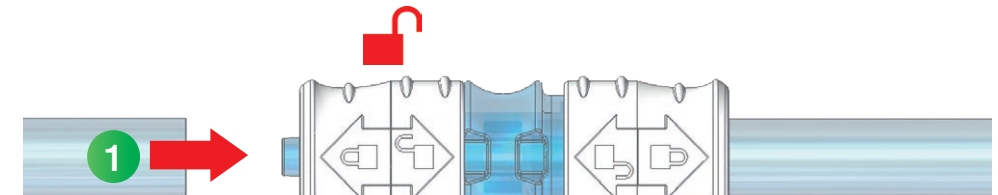

1 Schlauch zum Konnektieren bis zum Anschlag (ca. 2 cm) in Konnektor einführen.

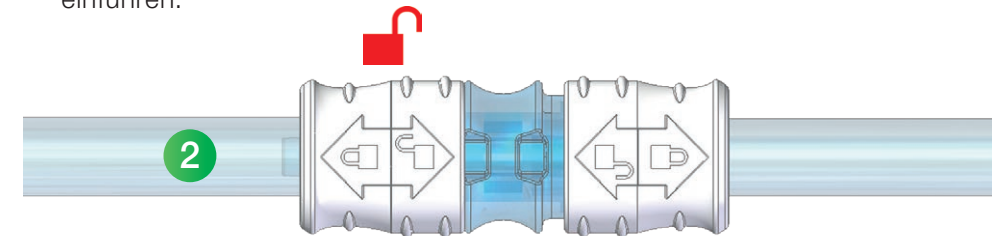

2 Schlauch ist eingeführt, Konnektor aber links noch unverriegelt.

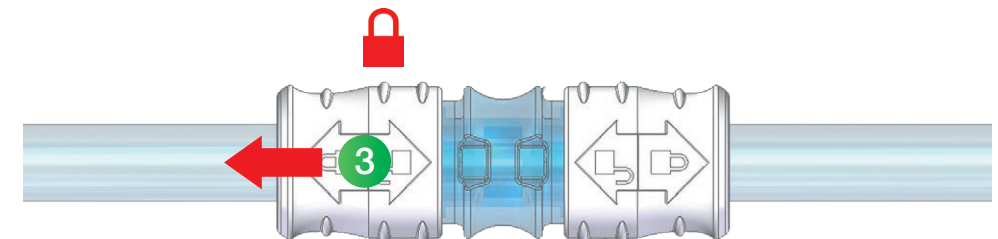

3 Konnektor links nach außen schieben, Konnektor ist beidseitig verriegelt.



Der Konnektor dichtet ab, wenn der Schlauch bis zum Anschlag eingeschoben ist. Wenn beide Schiebehülsen geschlossen sind, sind die maximalen Abzugskräfte sichergestellt.

3. Wie verwende ich die Suprasorb® CNP P3?



Startbildschirm



Voreinstellungen Therapie

Voreingestellter Therapiemodus


Nach dem Startbildschirm sehen Sie auf dem Bildschirm die Voreinstellungen für Ihre Therapie.

Ist der Bildschirmhintergrund orange, dann ist die Therapie unterbrochen.



Verändern von Einstellungen

Um Einstellungen wie die Helligkeit des Bildschirms, Datum und Uhrzeit, Sprache und Lautstärke anzupassen, drücken Sie

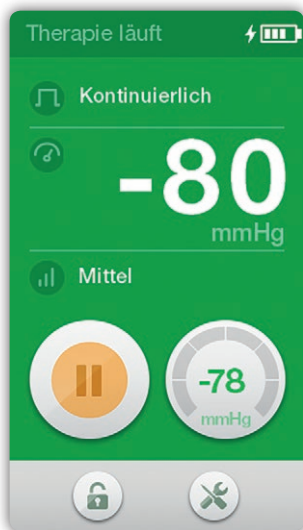

Therapie starten bzw. pausieren

Um die Therapie zu starten, drücken Sie **Ist der Bildschirm grün, ist die Therapie gestartet.**

Wenn Sie die Therapie wieder in den Pausemodus stellen möchten, drücken Sie

Sollte der Therapiebetrieb schon länger dauern, ist der Bildschirmbereich gesperrt. Zum Entriegeln drücken Sie länger auf , bis  erscheint.

Danach können Sie die Therapie mit in den Pausemodus stellen.




Wechsel des Exsudatbeutels bei Fehlermeldung „Exsudatbeutel voll“

Wenn der Exsudatbeutel, der das Wundsekret aufnimmt, voll ist, wird die nebenstehende Fehlermeldung angezeigt. Gehen Sie zum Wechsel des Exsudatbeutels wie folgt vor.


3. Wie verwende ich die Suprasorb® CNP P3?




Vorgehensweise beim Wechsel des Exsudatbeutels

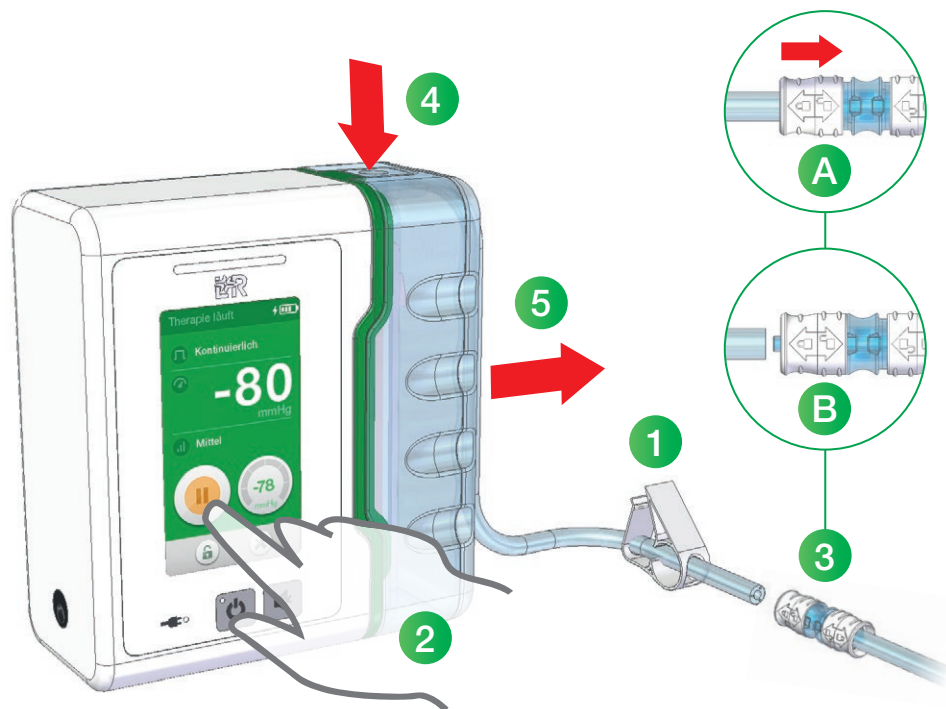

- Schließen Sie alle Schlauchklemmen ①, jene am Exsudatbeutel-Schlauch und am Wunddrainagesystem.
- Schalten Sie das Gerät in den Pausemodus ②.
- Lösen Sie den Exsudatbeutel-Schlauch vom Konnektor ③ des Wunddrainagesystems. Hierzu öffnen Sie zunächst den Konnektor, indem Sie die Schiebehülsen zusammenschieben A B.
- Lösen Sie das Behältersystem vom übrigen Gerät durch Drücken auf den oberen Teil des Behälters ④ und seitliches Abziehen ⑤.

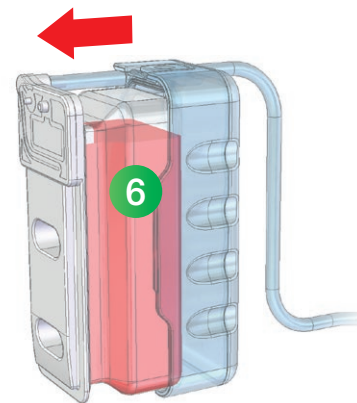

- Entnehmen Sie den vollen Exsudatbeutel ⑥ aus dem Behälter und entsorgen Sie ihn im Restmüll.

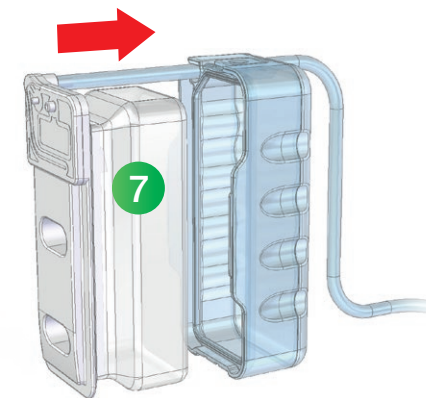

- Setzen Sie einen neuen Exsudatbeutel ⑦ ein.




- Verbinden Sie den Behälter ⑧ mit dem neuen Exsudatbeutel wieder mit dem Gerät. Verbinden Sie den Exsudatbeutel-Schlauch anschließend wieder mit dem Wunddrainagesystem. Der Konnektor wird geschlossen, indem Sie die Schiebehülsen auseinanderschieben.




- Öffnen Sie die Schlauchklemmen und starten Sie die Therapie ⑨.

4. Wie kann ich die Therapie in meinen Alltag integrieren?


Sie können die Therapieeinheit entweder liegend mit Bildschirm nach oben ...

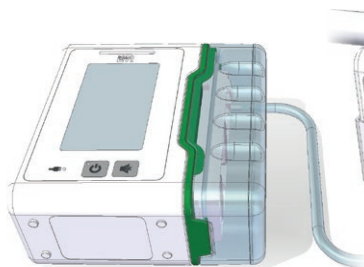

... oder mithilfe des Betthalters an einem Seitenteil Ihres Betts platzieren.

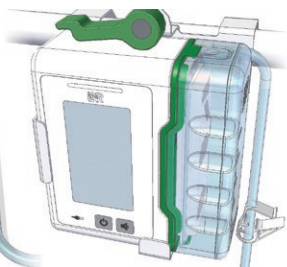

Die Therapieeinheit darf nicht auf dem Kopf stehend betrieben werden.

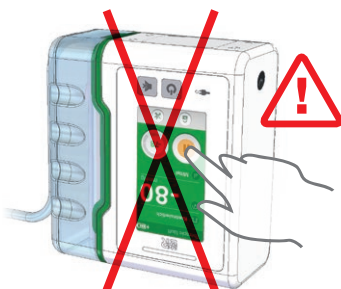

Wenn Sie mit ärztlichem Einverständnis das Bett verlassen dürfen, können Sie die Therapieeinheit in der mitgelieferten Tasche transportieren.

Quer



Über die Schulter



In der Hand



Am Gürtel

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht geknickt werden.



Duschen

Die Therapieeinheit darf nicht nass werden!



Deshalb dürfen Sie mit dem Gerät weder baden noch duschen. Wenn Ihr Arzt Ihnen sein Einverständnis zum Duschen gegeben hat, müssen Sie die Therapieeinheit zuvor in den Pausemodus stellen. Anschließend müssen die Verbindungen abgeklemmt und gelöst werden: Schlauchklemmen an beiden Schläuchen schließen, verbindenden Konnektor durch Zusammenschieben der Hülsen öffnen, dann Schlauch des Wunddrainagesystems herausziehen. Idealerweise duschen Sie, bevor ein neuer Verbandwechsel ansteht.




Reinigung

Sie können die Oberfläche der Therapieeinheit bei Bedarf mit einem weichen, leicht mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen.



Vor dem Zubettgehen

Es ist wichtig, dass Sie die Therapie in der Nacht nicht ausschalten. Eine Unterbrechung der Therapie darf innerhalb von 24 Stunden nicht mehr als 2 Stunden am Stück betragen. Bei einer längeren Unterbrechung muss erst der Verband gewechselt werden, bevor die Therapie erneut gestartet werden kann. Platzieren Sie das Gerät so, dass es in der Nacht nicht herunterfallen kann. Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht geknickt werden. Am besten laden Sie das Gerät über Nacht auf, sodass Sie am folgenden Tag mobil sein können.

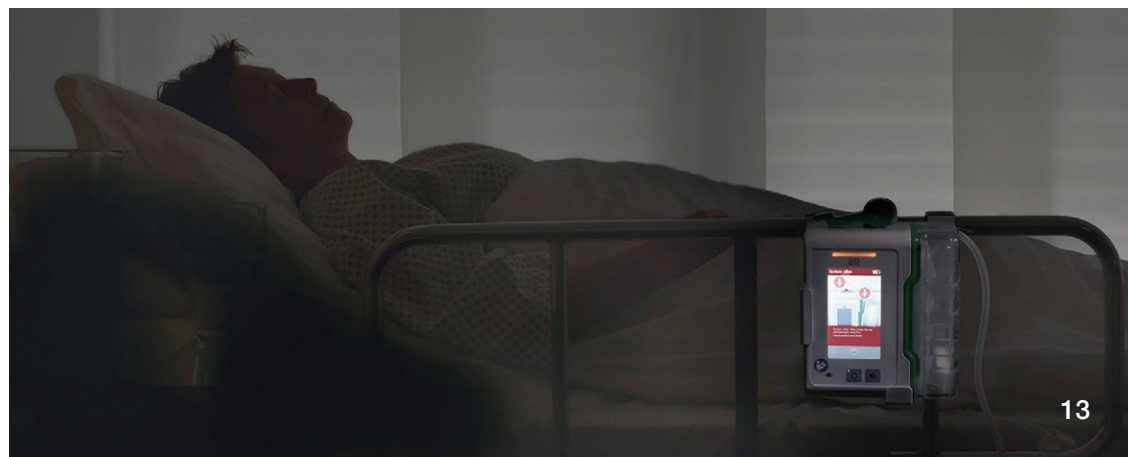

5. Welche Fehlermeldungen kann ich eigenständig beheben?

Es gibt einige Fehlermeldungen, bei denen Sie selbst aktiv werden können. Diese sind **„Exsudatbeutel voll“**, **„Akku niedrig“** oder **„Akku leer“**, **„keine Therapie“** oder **„interner Fehler“**. In diesen Fällen gehen Sie einfach wie auf dem Bildschirm beschrieben vor.

6. Wann wende ich mich an meinen Arzt/Pflegedienst oder meinen CNP-Spezialisten?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das Pflegepersonal, wenn eine Anpassung der Therapieeinstellungen oder ein Verbandwechsel vorgenommen werden muss. Auch wenn hellrotes Blut in den Schläuchen oder im Exsudatbeutel zu sehen ist, sind Ihr Arzt bzw. das Pflegepersonal der richtige Ansprechpartner.

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren CNP-Spezialisten, wenn die Fehlermeldungen **„System offen“**, **„System undicht“** oder **„System blockiert“** im Bildschirm angezeigt werden oder wenn Sie grundsätzliche Fragen zum Gerät haben.

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
7. Hilfreiche Telefonnummern



Arzt/Pflegedienst

Name

Telefon



Praxisstempel

CNP-Spezialist

Name

Telefon



Weitergehende Informationen

finden Sie auch im **Kapitel 5 „Bedienung durch den Patienten“** der im Koffer beiliegenden Gebrauchsanweisung.



People.Health.Care.