

# Die L&R Behandlungsempfehlung für die **keimbelastete Wunde**.

Situation  
**Keimbelastete Wunde**  
z. B. beim UCV



Schritt 1  
**Wundbett-  
vorbereitung**

**Debrisoft®**



**Monofilamentfaser-Pad zum mechanischen Debridement:**

- Aufnahme, Bindung und Entfernung von:
  - Exsudat
  - Debris
  - Bakterien - sogar Biofilm

Verringerung der bakteriellen Last in der Wunde

Optionaler Schritt  
**Wundfüller**



**Suprasorb® Liquacel Pro**



**Verstärkter hydroaktiver Faserverband:**

- Aufnahme, Bindung (Lock-In Technologie) und Entfernung von:
  - Exsudat
  - Debris
  - Bakterien

Verringerung der bakteriellen Last beim nächsten Verbandwechsel

Schritt 2  
**Wundauflage**



**Vliwazell® Pro**



**Saugkomresse mit Superabsorber:**

- Aufnahme, Bindung und Entfernung von:
  - Exsudat
  - Zytokinen, MMPs
  - Bakterien

Reduktion der Bakterienzahl beim nächsten Verbandwechsel

Schritt 3  
**Kompression bei der UCV Therapie**

**Rosidal® SC + Rosidal® K**



**Rosidal SC**

- die weiche Kompressionsbinde zur Unterpolsterung und richtigen Druckverteilung

**Rosidal K**

- Kurzzugbinde zur starken Kompression

Ideale Kombination bei keimbelasteten Wunden beim UCV



# Die L&R Behandlungsempfehlung

## Unsere Produkte für die keimbelastete Wunde.

### Schritt 1: Wundbettvorbereitung

#### Debrisoft® Pad Monofilamentfaser-Pad

steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
10 x 10	34 321	131 551 58	5/50
13 x 20	34 323	131 552 01	5/50

#### Debrisoft® Lolly

steril, einzeln eingeschiegelt

REF	PZN	VE (Stk.)
33 224	135 695 69	5/50

### Schritt 2a: Wundfüller

#### Suprasorb® Liquacel Pro Hydroaktiver Faserverband

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
5 x 5	149 710	187 726 25	10/260
10 x 10	149 711	187 726 60	10/130
15 x 15	149 712	187 726 77	5/75
2 x 45	149 713	187 726 83	5/120

### Schritt 2b: Wundauflage

#### Vliwazell® Pro Saugkomresse mit Superabsorber

steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
10 x 10	109 460	140 051 42	10/240
10 x 20	109 461	140 051 59	10/120
15 x 20	109 462	140 051 65	10/80
20 x 25	109 463	140 051 71	10/100
20 x 40	109 464	140 051 88	10/100
10 x 20	139 466	172 952 93	30/90
15 x 20	139 467	172 953 01	30/60

### Schritt 3: Therapie der Grunderkrankung bei UCV

#### Rosidal® SC Kompressionsbinde, weich

mit Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)
10 x 2,5	33 500	00 144 880	1/18
15 x 2,5	33 501	00 144 897	1/24
10 x 3,5	33 503	09 929 660	1/24

#### Rosidal® K Kurzzugbinde

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
<b>5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern (außer 4-cm-Binde), einzeln in Faltschachtel</b>			
4	22 199	026 639 63	1/125
6	22 200	008 859 61	1/108
8	22 201	008 859 78	1/108
10	22 202	008 859 84	1/90
12	22 203	008 859 90	1/54

**10 m (gedehnte Länge), ohne Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel**

10	22 206	026 639 86	1/60
12	22 205	037 735 82	1/40

**5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, lose im Karton**

8	22 250	048 471 76	10/140
10	22 251	048 471 82	10/140
12	22 252	049 063 64	10/120

**steril, 5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, einzeln eingeschiegelt**

6	20 650	047 805 61	10/90
8	20 651	047 805 78	10/90
10	20 652	047 805 84	10/100
12	20 653	047 805 90	10/100

#### Rosidal® Elko® K Kurzzugbinde

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
<b>5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, paarw. in Faltschachteln</b>			
8 + 10	34424	11 483 800	1/30



Das partnerschaftliche Netzwerk auf Augenhöhe – aus der Praxis für die Praxis. Mehr Infos erfahren Sie hier: [info.diewundzentrale.com](http://info.diewundzentrale.com)